

TROJA 5G



NO Bruksanvisning
EN User manual
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel d'instructions
NL Gebruiksaanwijzing

www.topromobility.com


Made in Norway 

NO


EN

DE

FR

NL

TOPRO TROJA 5G

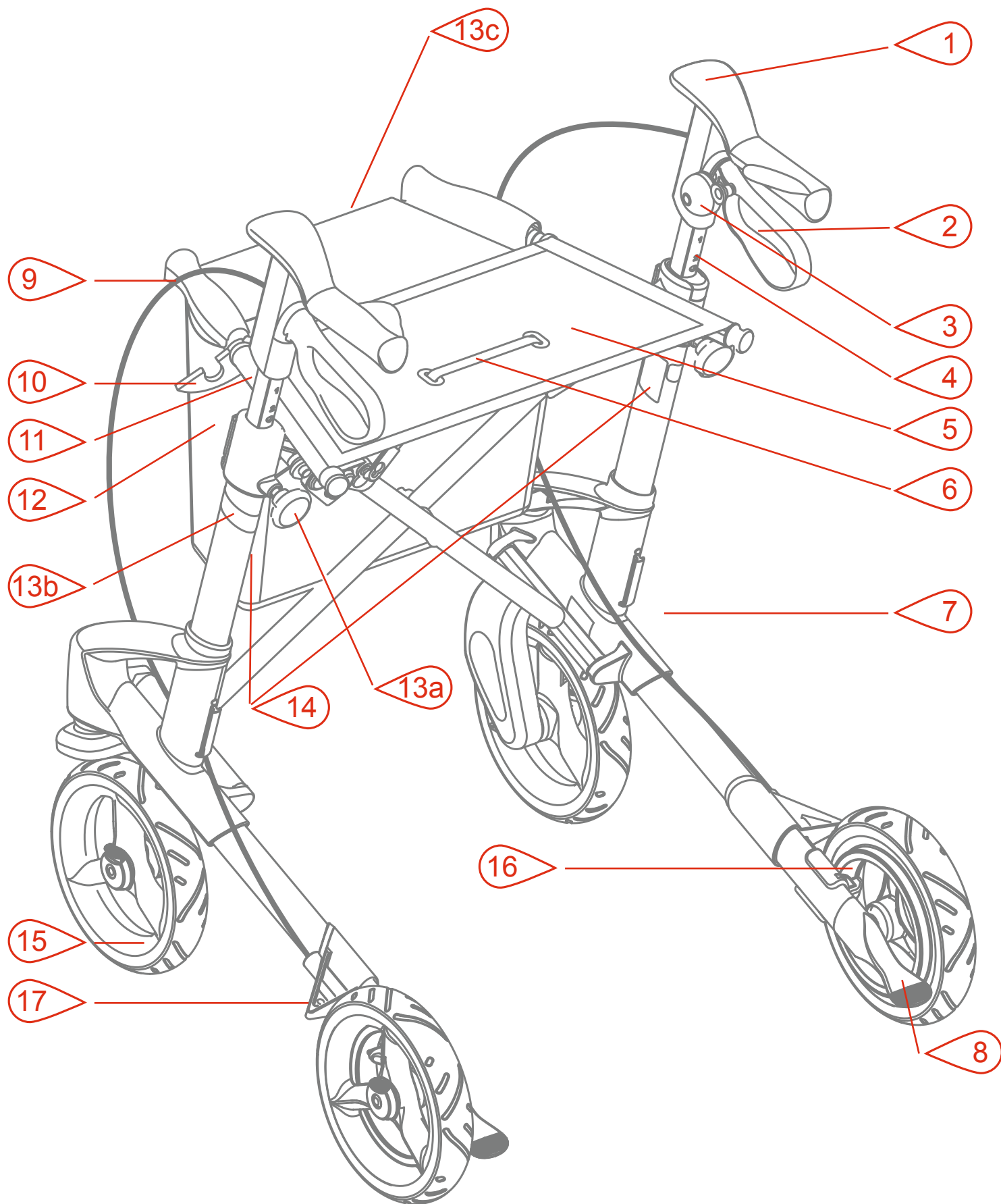

Lernen Sie Ihren TOPRO Troja 5G kennen

Beachten Sie hierzu bitte die Rollatordarstellung auf S.1.

1. Ergonomische Handgriffe „TOPRO Ergo Grip“:

Hilfe beim Aufstehen, breite Auflage für Handballen, weiches hand-schmeichelndes, desinfizierbares PU-Material, integrierte Aufnahme für den Rückengurt.

2. Geschlossene Bremsbügel:

Einfaches Platzieren der Hand und sicheres Bremsen.

3. Klingel:

Einfache Bedienung, ohne die Hand vom Griff zu nehmen.

4. Griffhöhereinstellung mit Memoryfunktion:

Einfaches und sicheres Einstellen der richtigen Griffhöhe für ein ergonomisches Gangbild. Zahlen auf den Griffstangen für ein noch leichteres Anpassen.

5. Sitznetz:

Bequem und sicher Sitzen wie in einem Gartenstuhl. Benutzergewicht max. 150 kg (M) / 125 kg (S).

6. Grauer Entriegelungsgurt für den Faltmechanismus im Sitznetz integriert:

Zug am Band entriegelt den Rollator und er kann gefaltet werden.

7. Seitenrahmen:

Mit integrierten Zubehöradaptoren. Sehen Sie sich die große Auswahl an Zubehör auf www.topromobility.com an.

8. Ankipphilfe:

Macht es einfacher und bequemer, kleine Hindernisse wie Bordsteine und Schwellen zu überwinden.

9. Bremsseil

10. Verschlussbügel:

Fixiert Ihren Rollator in gefaltetem Zustand für eine einfache Handhabung und einen sicheren Transport in jeder Lage.

11. Tragegriffe/Seitenstangen:

Fixierung für die Einkaufstasche und zugleich der einzige Griff, an dem der TOPRO Troja 5G gehoben werden darf.

12. Abnehmbare Einkaufstasche mit reflektierendem Band:

Hier können Sie Ihren Einkauf sicher mit nach Hause nehmen. Belastbarkeit 10 kg.

13. Reflektierende Aufsätze:

Reflektierende Aufsätze sind an wichtigen Stellen des Rollators angebracht, damit Sie besser zu sehen sind.



14. Produktaufkleber:

Alle wichtigen Informationen inkl. Herstellername, Seriennummer, maximale Belastbarkeit, maximale Höhe und maximale Länge des Rollators (siehe auch Seite 23).

15. Leicht abnehmbare Räder „TOPRO Quick Release“ zum Wechseln

16. Innenliegendes Bremssystem (IBS)

Der Bremsblock bremst innerhalb des Rades und nicht auf der Radoberfläche.

17. Kantenabweiser:

Fahren, ohne an Stühlen und Kanten hängen zu bleiben.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TOPRO Troja 5G

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges Produkt zur Förderung Ihrer Mobilität im Alltag entschieden. TOPRO hat dieses Produkt auf Grundlage von aktuellen Forschungsergebnissen, höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen sowie auf Basis der allgemein bekannten Anforderungen an einen Rollator für Ihre Ansprüche in Norwegen entwickelt und produziert.

Die TOPRO Produktion folgt den Normen für das Qualitätsmanagement ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001.



Der TOPRO Troja 5G ist konform mit der EG Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Er wurde nach DIN EN ISO 11199-2:2005 geprüft.

Sollten Sie einen Mangel oder Schaden an Ihrem TOPRO Troja 5G entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler, Ihr Sanitätshaus oder wenden Sie sich per Email an qualitaet@topro.de.

Das Gleiche gilt bei allgemeinen Fragen zum Produkt. Wenn Sie Probleme beim Lesen dieser Bedienungsanleitung haben, steht Ihnen unter www.topromobility.com eine digitale Version zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrem TOPRO Produkt einen angenehmeren Alltag, mehr Mobilität und einen größeren Bewegungsspielraum erreichen.

Herzlichst Ihr

TOPRO

TOPRO Industri AS

! Hinweise vor dem ersten Gebrauch/ bei regelmäßiger Nutzung


Bitte beachten Sie folgendes:

- **Zweckbestimmung:** TOPRO Troja 5G soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Er wurde zum Schieben, nicht Ziehen entwickelt. Er bietet die Möglichkeit, sich auf dem Sitznetz auszurufen und in der Tasche Dinge bis maximal 10 kg zu transportieren. Der Rollator wurde für Erwachsene konzipiert. Größen- und Gewichtsbeschränkungen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 29.
- **Kontraindikationen:** Der Rollator ist nicht geeignet für Nutzer mit wenig Armkraft, schlechtem Gleichgewicht oder erheblichen kognitiven Einschränkungen. Das Produkt ist für den Gebrauch drinnen und draußen design und geprüft. Draußen ist der Rollator als Hilfsmittel für die Nutzung auf Straßen und Gehwegen gedacht. Er ist nicht geeignet für unebenes und/oder steiles Gelände oder Steigungen, z.B. Treppen. Verwenden Sie den Rollator nicht auf rutschigen oder vereisten Oberflächen.
- Achten Sie beim Auseinander- und Zusammenfallen des Rollators auf Ihre Finger. Es besteht Klemmgefahr.
- Bitte nicht die Finger in Aussparungen oder zwischen feste Teile halten.
- Prüfen Sie vor jeder Anwendung, dass die Bremsen des TOPRO Troja 5G sicher funktionieren, der Rollator durch einen hörbaren <Klick> sicher eingerastet ist und die Handgriffe fest verschraubt sind.
- Betätigen Sie immer beide Parkbremsen, wenn Sie den TOPRO Troja 5G anhalten oder parken. Stellen Sie sicher das beide Parkbremsen aktiviert sind, wenn Sie sich setzen.
- Beim Schieben des TOPRO Troja 5G sollte die Parkbremse nicht aktiviert sein oder die Fahrbremse nicht permanent gezogen werden.
- Das maximale Benutzergewicht des TOPRO Troja 5G beträgt 150 kg (M) / 125 kg (S). Er darf nicht als Transportmittel für schwere Gegenstände oder Personen genutzt werden.
- Für Ihre eigene Sicherheit ist es nicht erlaubt, sich auf dem TOPRO Troja 5G sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen/beugen. Den Rollator nicht mehr als max. 5 Grad zur Seite neigen. Sturzgefahr! Aus demselben Grund sollten Taschen u.ä. nie an den Handgriffen befestigt werden.
- Machen Sie Kinder darauf aufmerksam, dass ein TOPRO Troja 5G kein Spielgerät ist.
- Bei extremen Außentemperaturen können sich Teile des TOPRO Troja 5G entsprechend heiß oder kalt anfühlen. Halten Sie den Rollator von Feuer und heißen Gegenständen fern.
- Achten Sie auch darauf, dass Ihre Hosen/Röcke nicht so weit sind, so dass sich diese am TOPRO Troja 5G verfangen können. Tragen Sie festes Schuhwerk, um Verletzungen.
- Während der Fahrt in einem öffentlichen Verkehrsmittel ist aus Sicherheitsgründen das Sitzen auf dem Rollator untersagt. Stellen Sie Ihren Rollator sicher ab und betätigen Sie die Parkbremse.
- Den Rollator nicht auf Treppen nutzen. Besondere Vorsicht ist geboten beim Heruntergehen von Bordsteinen.
- Beachten Sie, dass auf abschüssigen Wegen die Rollgeschwindigkeit des Rollators höher sein kann als Ihre Gehgeschwindigkeit. Hier besteht Sturzgefahr!
- Um den richtigen Umgang mit diesem Produkt zu lernen, empfehlen wir ein entsprechendes Training durch eine fachkundige Person.
- TOPRO übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzung seiner Produkte mit Zubehör, welches nicht explizit von TOPRO als solches freigegeben wurde. Unterlassen Sie Änderungen/Modifikationen des Rollators. Diese können die Sicherheit negativ beeinflussen und die Herstellerhaftung erlischt.

Nach all diesen Hinweisen fragen Sie sich bestimmt, wie Sie sicher und ergonomisch in Ihrem neuen TOPRO Troja 5G laufen können.

Damit der TOPRO Troja 5G eine gute und sichere Hilfe für Sie sein kann, ist es wichtig, dass Sie den Rollator nah am Körper schieben. Nur so können Sie sich bei einem eventuellen Sturz gut auf dem TOPRO Troja 5G abstützen. Ein aufrechter Gang mit dem Blick nach vorne erleichtert Ihnen, die Balance zu halten.

Absolut wichtig für den richtigen Gebrauch ist die Einstellung der richtigen Griffhöhe. Lesen Sie bitte hierzu den Punkt C (S. 25) mit äußerster Sorgfalt. Falls Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Therapeuten.

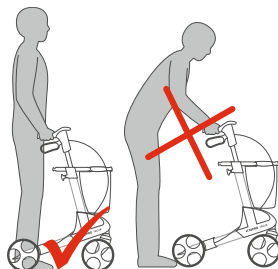

Garantie



TOPRO TROJA hat 7 Jahre Garantie. Ausgenommen von dieser Garantieleistung sind natürlicher Verschleiß und/oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Verschleißteile sind insbesondere: Bremsklötze, Bremsseil, Räder, Sitznetz, Handgriffe, Korb etc.

Die Garantie erlischt, sobald keine Original-Ersatzteile oder Originalzubehör am Produkt verwendet werden.

Für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Erwartete Produktlebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Produktes beträgt 10 Jahre, Voraussetzung ist die bestimmungsgemäße Verwendung laut dieser Bedienungsanleitung und der darin beschriebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen.

Sicherheit und Komfort

Überall wo Sie diese Symbole finden liegt ein, besonderes Augenmerk, entweder auf der Sicherheit oder dem Komfort des Produkts.



Komfort




Sicherheit

Symbole am TOPRO Troja 5G



Maximales Benutzergewicht

Max 150kg

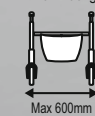

Maximale Rollatorbreite

Max 600mm



Maximale Rollatorhöhe

Max 1035mm

Ein separates Label auf dem Rohr zeigt die Seriennummer (SN), das Produktionsjahr und den -monat.

A. Auseinander-/Zusammenfalten

Verstauen und Reisen

Auseinanderfalten

Um den TOPRO Troja 5G auseinanderfalten zu können, müssen Sie lediglich den Verschlussbügel der Tragegriffe (1) lösen und diese mit etwas Druck so lange nach unten schieben, bis ein hörbarer <Klick> zu vernehmen ist (2).

Zusammenfalten

Wenn Sie den TOPRO Troja 5G falten wollen, sei es, weil Sie ihn im Auto mitnehmen wollen oder weil Sie gerade nur wenig Platz haben, um den Rollator abzustellen, ziehen Sie einfach den grauen Entriegelungsgurt auf der Sitzfläche nach oben (3). Dann die Tragegriffe ein wenig zusammendrücken. Achten Sie bei montierter Tasche darauf, dass sie nicht befüllt ist, dass der Stoff der Tasche nicht zu weit zwischen den Tragegriffen herausragt und den Verschlussbügel blockiert.

Zu guter Letzt noch den Verschlussbügel am Tragegriff fixieren (4). Jetzt steht Ihr TOPRO Troja 5G klein, aber sicher auf allen vier Rädern. Zur weiteren Verkleinerung können Sie die Schiebegriffe für den Transport versenken (siehe S.25, Punkt C & D) und die Räder abnehmen (siehe S.26, Punkt G).

Hinweis

Der Entriegelungsgurt ist nur zum entriegeln des Faltmechanismus zu verwenden. Er dient in keinem Fall als Tragegurt.

B. Einkaufstasche



Transport und Einkauf

Die Einkaufstasche ist inklusive. Sie nimmt bis zu 10 kg Ladung auf und ist dank zweier Trageaufnahmen sehr einfach und schnell abnehmbar.

Zur Montage der Tasche stehen Sie im gebremsten Rollator (1). Heben Sie die Tasche vorne leicht an, damit sie unter das Sitznetz gelangt (2). Drücken Sie sie nun seitlich ein wenig zusammen und dann auf die Tragegriffe des Rollators. Sie hören dabei ein <Klick> (3). Achten Sie darauf, dass die Bremsseile auch nach der Montage außen am Rahmen entlang laufen (4).

Um die Tasche abzunehmen, stehen Sie wieder im gebremsten Rollator, je eine Hand rechts und links vorne an der Aufnahme der Tasche platziert. Durch leichtes Anheben und Zusammendrücken der Tasche vorne, kann diese abgenommen werden. Nutzen Sie dazu bitte unbedingt beide Hände.

Ihre Einkäufe können nun auch nach Abstellen des Rollators bequem mit der Einkaufstasche weiter transportiert werden. Die Einkaufstasche unterstützt Sie dabei mit einem Schultergurt. Bei Nutzung der Einkaufstasche am Rollator stellen Sie bitte sicher, dass der Schultergurt sicher verstaut ist, um ein mögliches Einklemmen in den Vorderreifen zu vermeiden. Die Einkaufstasche kann schonend bei 40 °C von Hand gewaschen werden.

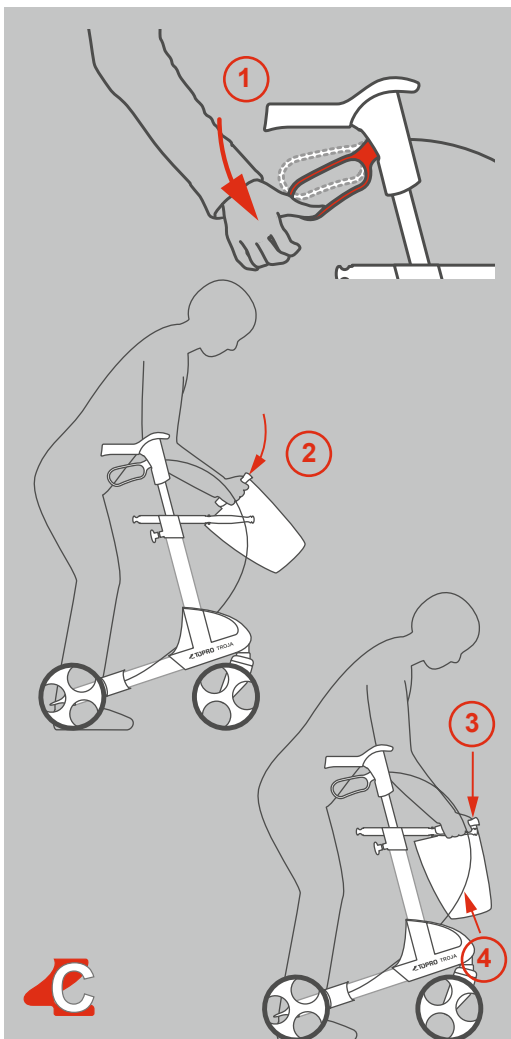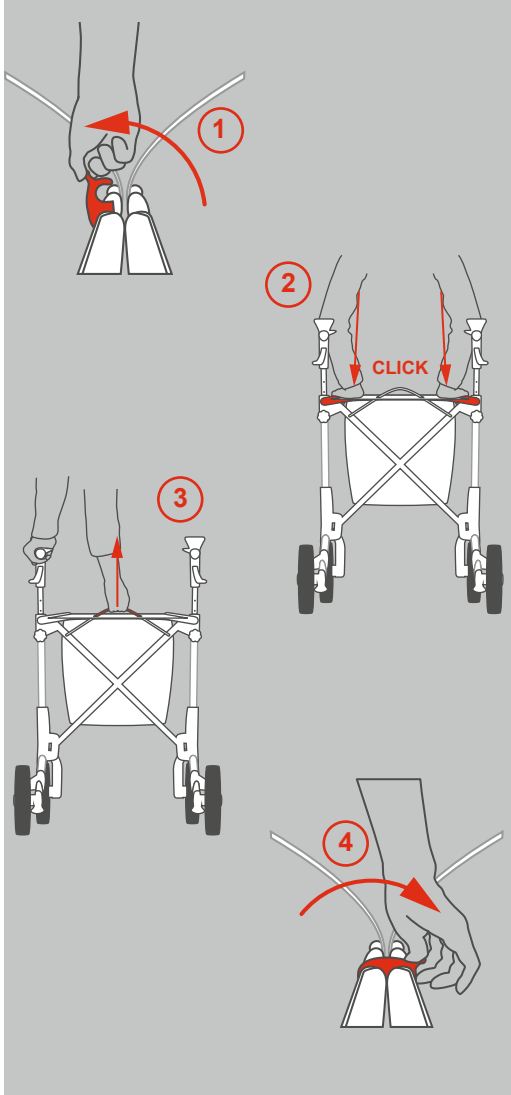

C. Einstellen der Griffhöhe


Ergonomisch gehen und stehen

Wie bereits erwähnt, ist die korrekte Griffhöhe für Ihre Körperhaltung und Sicherheit sehr wichtig. Die korrekte Griffhöhe finden Sie, indem Sie sich in den TOPRO Troja 5G stellen, die Arme locker hängen lassen, dabei den Ellenbogen ein wenig beugen und Ihre Handfläche so gut es geht nach oben ziehen. Die Höhe der Daumenballen entspricht nun der Höhe der Schiebegriffe.

Nur mit einer korrekten Griffhöhe in Kombination mit dem Laufen innerhalb des TOPRO Troja 5G können Sie sich sicher abstützen.

Um die Griffhöhe einzustellen, die Rändelschraube mit ein paar Umdrehungen nach links lösen (1), die Griffstange auf die gewünschte Höhe herausziehen (2) bzw. in den Rahmen hineinschieben (2) und dabei leicht hoch/runter bewegen, bis ein <Klick> zu hören ist, dann die Rändelschraube mit wenigen Umdrehungen nach rechts feststellen (3).

Wichtig ist, beide Handgriffe auf dieselbe Höhe einzustellen, indem Sie die Nummernskala auf jeder Seite vergleichen, um eine symmetrische Körperhaltung zu erzielen.

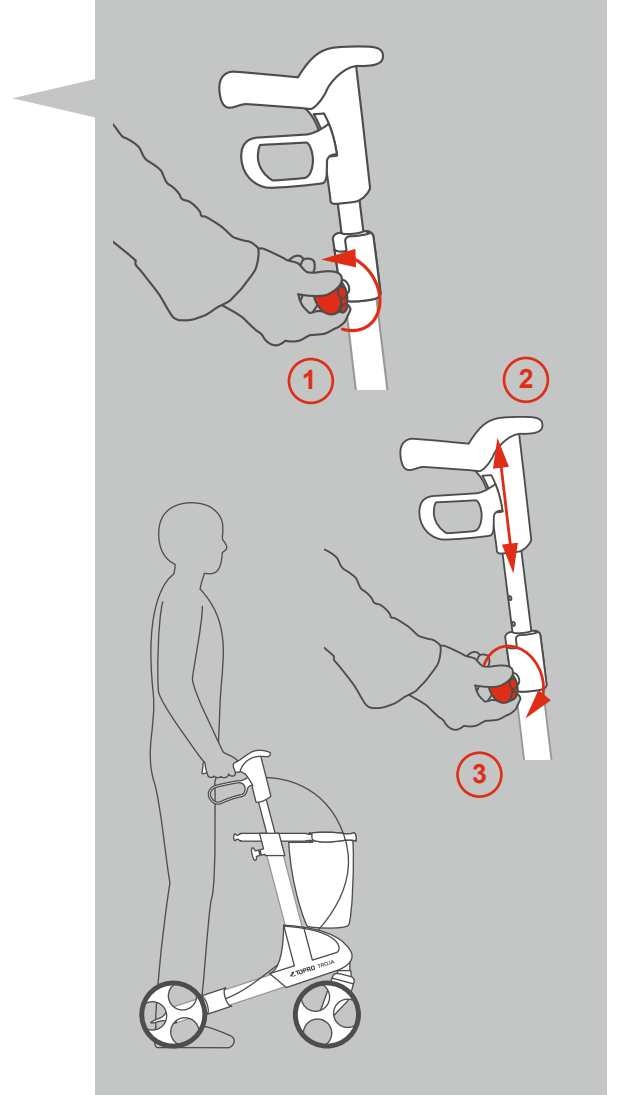


D. Höheneinstellung mit Memoryfunktion

Immer die richtige Griffhöhe

Die Memoryfunktion legt Ihre ergonomisch richtige Griffhöhe fest und ermöglicht ein einfaches Verkleinern Ihres TOPRO Troja 5G beim Transport sowie die Wiederherstellung Ihrer persönlichen Griffhöhe beim Gebrauch.

Zuerst die optimale Griffhöhe (siehe S. 25, Punkt C) einstellen und die Anzahl der sichtbaren Arretierlöcher auf der Griffstange zählen und merken (s. Nummernskala). Nun die Rändelschraube vollständig lösen (1), den Griff inklusive der Kunststoffführung und Griffstange vollständig aus dem Rahmen ziehen (2). Den roten Memoryknopf durch eine halbe Umdrehung lösen und herausziehen (3). Zählen Sie zu den bereits gemerkten Arretierlöchern 2 hinzu, um dort den Memoryknopf einzudrehen. Die Griffstange mit der Kunststoffführung und dem Memoryknopf wieder vollständig in den Rahmen einführen (4). Die Rändelschraube ganz eindrehen (5).

Zur Einstellung Ihrer Griffhöhe den Handgriff mit wenigen Umdrehungen lösen (1) und diesen dann maximal herausziehen (2). Die Schraube festdrehen (5). Sie haben nun die für Sie korrekte ergonomische Stützhöhe und beim Hoch- und Runterschieben der Handgriffe wird diese zukünftig immer automatisch eingestellt.

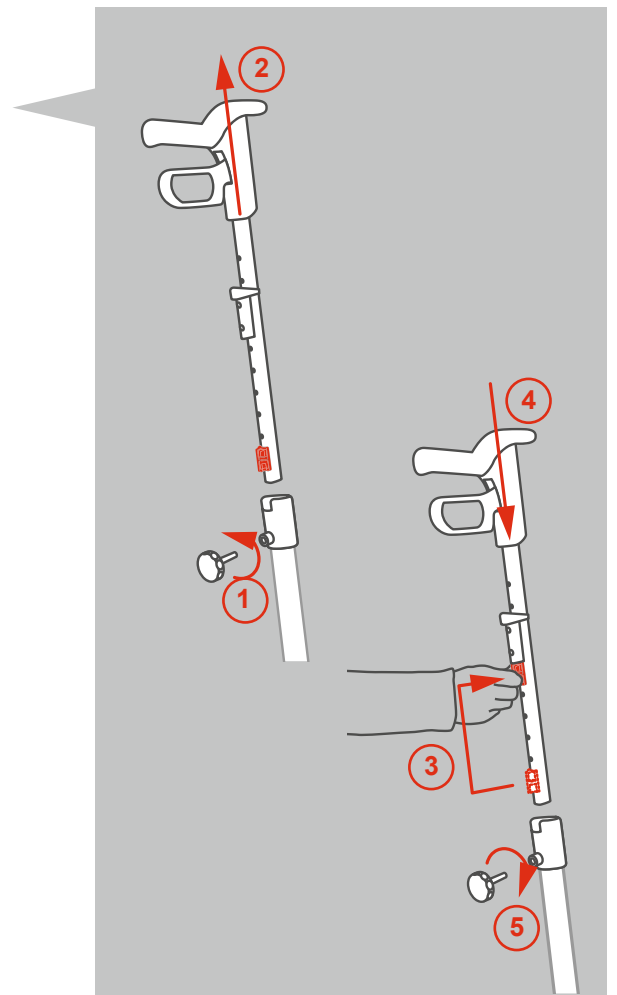

E. Bremsen

Stoppen und Parken

Die Handbremse kann auf zwei verschiedene Arten betätigt werden. Als sogenannte Fahrbremse und als sogenannte Parkbremse.

Fahrbremse (1): Die Fahrbremse wird immer dann genutzt, wenn Sie während des Schiebens den TOPRO Troja 5G abbremsen müssen. Um die Fahrbremse zu aktivieren, müssen Sie nur den Bremsgriff auf beiden Seiten nach oben ziehen. Sofort ist die Bremse aktiv. Beim Loslassen der Bremsgriffe ist Ihr TOPRO Troja 5G wieder fahrbereit. Um Schäden an den Räder zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Bremse nicht permanent während des Gehens betätigen.

! Parkbremse (2): Die Parkbremse wird genutzt, wenn der TOPRO Troja 5G für längere Zeit „geparkt“ wird. So zum Beispiel, wenn Sie sich ein wenig ausruhen wollen und sich auf den TOPRO Troja 5G setzen. In dieser Situation ist es zwingend notwendig, die Parkbremse zu betätigen! Dazu beide Bremshebel mit den Fingern oder den Daumen nach unten drücken. Jetzt ist die Parkbremse aktiv. Um diese wieder zu lösen, beide Bremshebel nach oben ziehen.

F. Einstellung/Kontrolle der Bremsen

Die Kontermutter lösen (1). Danach das Bremsseil mit der Justierschraube anpassen (2). Stellen Sie den Bremsklotz (3) so nah wie möglich zur innen liegenden Bremse ein und schrauben Sie danach die Kontermutter zu (1). Drehen Sie anschließend das Hinterrad, um sicherzustellen, dass der Bremsklotz nicht das Rad berührt.

Die Bremsklötze und -federn sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um sicher zu stellen, dass sie optimal funktionieren. Die Räder und Bremsen können bei Mängeln oder Verschleiß ausgewechselt werden.

G. Auswechselbare Räder „TOPRO Quick Release“

Passende Bereifung zum Untergrund




Wollen Sie die Räder an Ihrem TOPRO Troja 5G für den Transport abnehmen oder auswechseln, gehen Sie wie folgt vor:

Abnehmen: Die Bremsbügel sind gelöst. Drücken Sie den roten Knopf (1), halten Sie ihn gedrückt und ziehen das Rad von der Achse (2).

Montieren: Die Bremsbügel sind gelöst. Schieben Sie das Rad auf die Achse (2). Schieben Sie das Rad auf der Achse so weit wie möglich nach innen, damit das Rad auf der Achse einrastet. Sie werden ein „Klicken“ hören, wenn das Rad an seinem Platz ist. Das Rad ist sicher befestigt, wenn die Achse in der Mitte der Nabe vollständig sichtbar ist (3). Ziehen Sie vorsichtig an dem Rad, um zu überprüfen, ob es sicher auf der Achse befestigt ist.

Nach der Radmontage überprüfen Sie bitte die Bremse und stellen Sie diese wenn nötig entsprechend ein (siehe Abschnitt Einstellung / Kontrolle / Wartung der Bremsen).

Optional erhältlich sind auch Off-Road Räder und Spikereifen. Dies ist möglich aufgrund des IBS (innenliegenden Bremssystem), das innerhalb des Rades bremst anstatt auf der Radaußenseite.

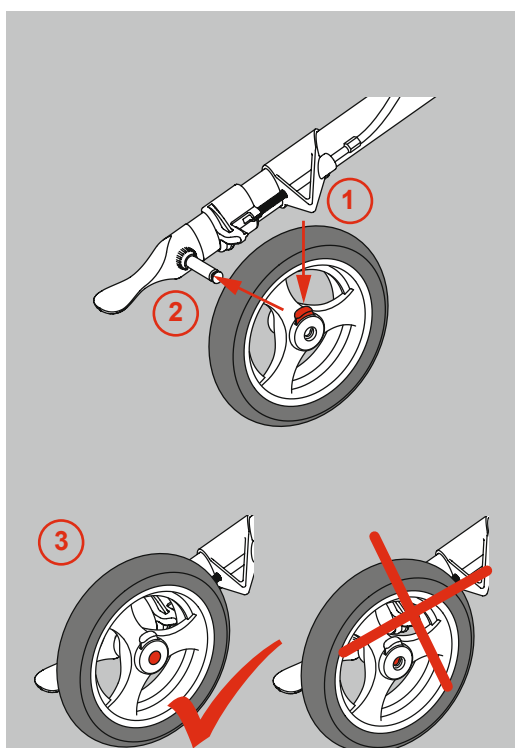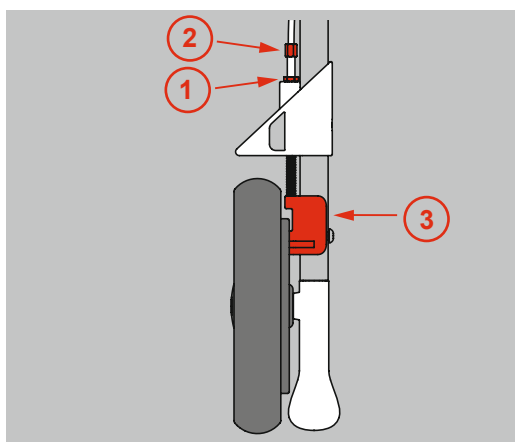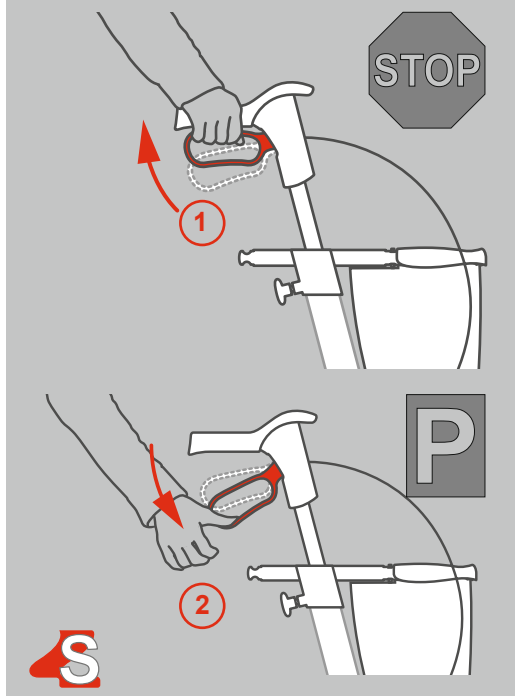


H. TOPRO Ergo Grip

Komfortables Aufstehen und Stützen

Der TOPRO Ergo Grip bietet ergonomische Greif- und Stützflächen. Er kombiniert die klassische Handgriffposition (1) mit einem Greifknauf (2) im vorderen Bereich. Der Ergogrip ermöglicht besseres Aufrichten z.B. aus einem Stuhl oder Sessel (3) (bitte betätigen Sie dabei immer die Parkbremse (4)) und unterstützt aufrechtes Stehen im Rollator (5).

Durch Umgreifen können Sie Ihre Stützposition Ihrem jeweilig gewünschten Stehkomfort anpassen.

Der Rollator sollte immer nur in der klassischen Griffposition (1) mit direktem Kontakt zu den Bremsen geschoben werden.

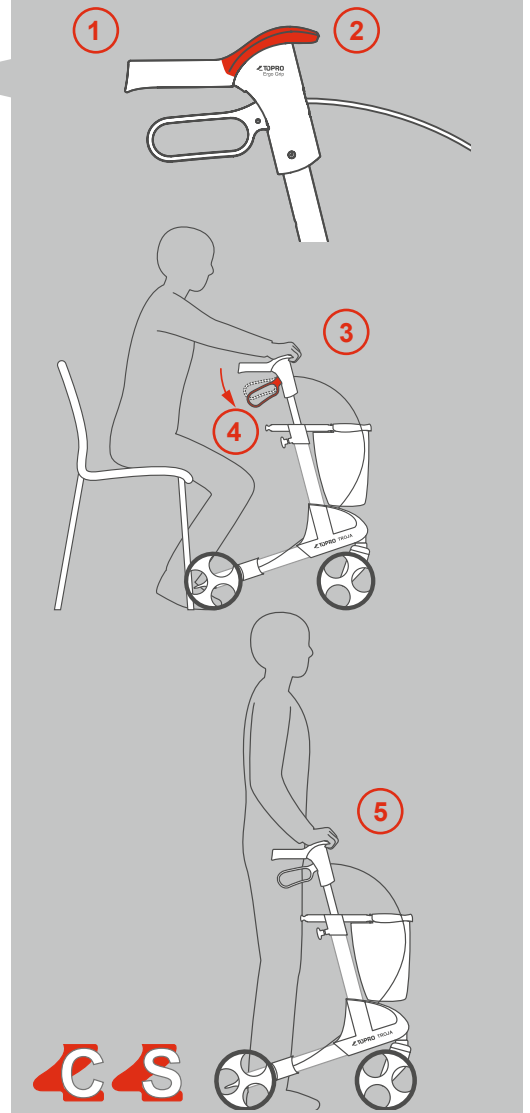


I. Sitznetz

Sitzen und Ausruhen

Wenn Sie sich ein wenig ausruhen wollen, können Sie sich bequem auf das Sitznetz des TOPRO Troja 5G setzen. Dazu unbedingt vorher beide Parkbremsen betätigen (1), damit der Rollator sicher steht! Setzen Sie sich immer mit dem Rücken zum Einkaufskorb* (2)!

Für mehr Komfort beim Sitzen ist ein Rückengurt als Zubehör erhältlich (siehe S. 30). Zudem ist es für Ihre eigene Sicherheit nicht erlaubt, sich auf dem TOPRO Troja 5G sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen/beugen (3).


Das Sitznetz, durch das Sie beim Gehen den Boden sehen können, kann bei Bedarf mit einem Tuch abgewischt werden.

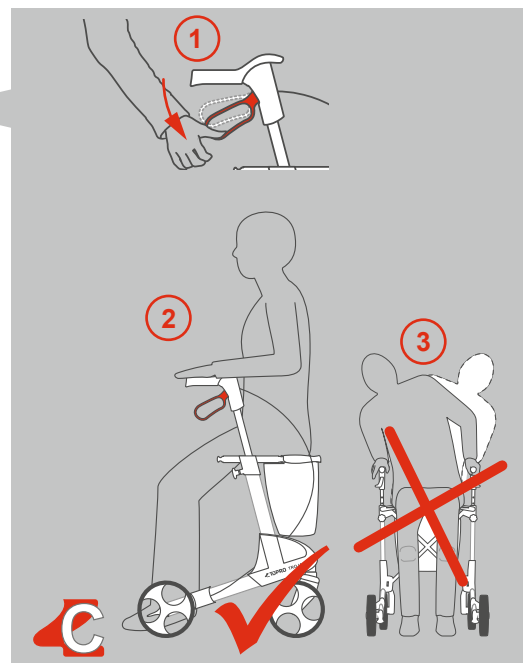

J. Kantenabweiser

Sicherheit beim Gehen

Die Kantenabweiser (1) an den Hinterrädern verhindern ein Hängenbleiben an vorstehenden Kanten, Türrahmen und Ähnlichem. Sie sind so konzipiert, dass Sie sicher an den Hindernissen vorbei manövriert werden.

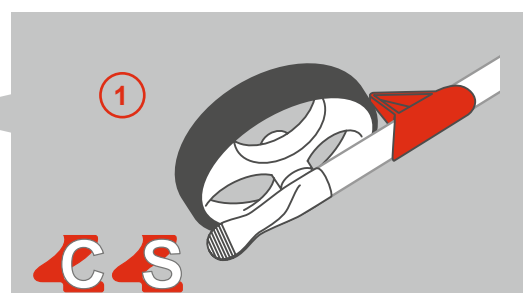


K. Ankipphilfe

Überwinden von Hindernissen

Die breite Ankipphilfe (1) hilft Ihnen, Schwellen, Bürgersteige und andere kleinere Hindernisse sicher zu überwinden. Dazu direkt vor das Hindernis fahren, aus dem sicheren Stand einen Fuß auf der Ankipphilfe platzieren und den Fuß auf die Ankipphilfe drücken (2). Hierdurch wird Ihr TOPRO Troja 5G vorne angehoben und kann dann sicher auf/über das Hindernis gefahren werden.



Bitte beachten: Besondere Vorsicht ist geboten beim Heruntergehen von Bordsteinen. Den Rollator nicht auf Treppen nutzen.

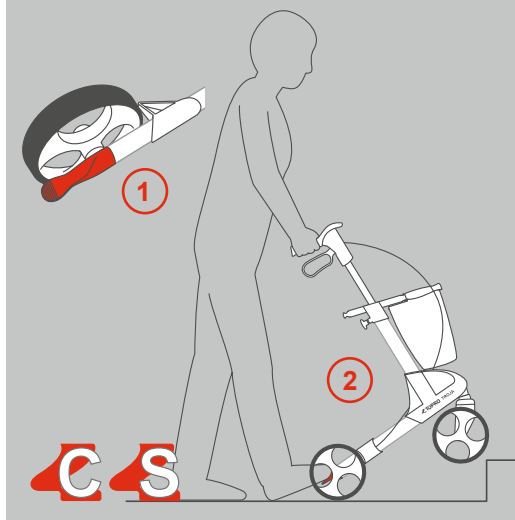


L. Tragegriff/Seitenstangen

Transport und Lagerung

Wollen Sie Ihren TOPRO Troja 5G im zusammengefalteten und mit dem Sicherheitsbügel fixierten Zustand heben, ziehen oder tragen, dann ist dieser Griff ergonomisch perfekt ausbalanciert (1).

Dies ist der einzige Griff, an dem der TOPRO Troja 5G gehoben werden darf!

Als Zusatznutzen ist an dem Griff der Einkaufskorb* fixiert.

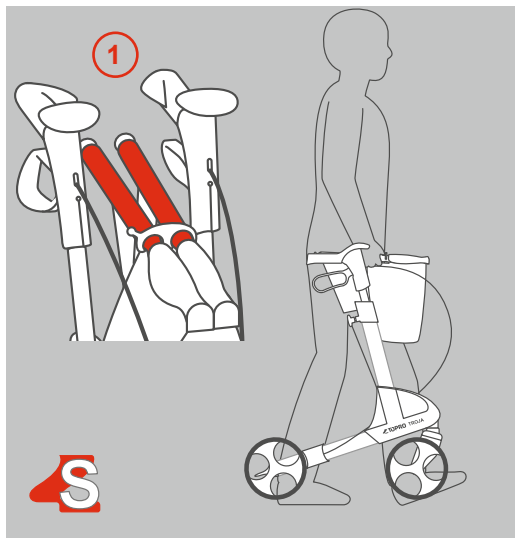

Aufbewahrung

Stellen Sie Ihren TOPRO Troja 5G in Räumlichkeiten stehend ab. Obwohl der TOPRO Troja 5G rostresistent ist, wäre es sinnvoll, bei Lagerung im Freien einen wettergeschützten Platz oder eine Überdachung zu suchen, um Aufheizung oder Unterkühlung zu vermeiden. Lassen Sie den Rollator nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Rollator.

Transport

Den Rollator in gefaltetem und gesicherten Zustand (siehe Abschnitt *Auseinander-/Zusammenfalten*) transportieren. Stellen Sie sicher, dass der Verschlussbügel richtig eingehakt ist, so dass sich der Rollator nicht unbeabsichtigt entfaltet. Achten Sie auch beim Verladen ins Fahrzeug auf diese Punkte.

Wenn der Rollator nicht funktioniert wie er soll

Kontrollieren Sie, ob der Rollator richtig entfaltet ist. Untersuchen Sie, ob beide Bremshebel in der richtigen Position sind.

Technische Daten

TOPRO Troja 5G

Größe	M (medium)	S (small)
Empfohlene Körpergröße	150–200 cm	135–170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	125 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg / 15 l	10 kg / 15 l
Höhe der Handgriffe	780–1000 mm	710–860 mm
Größte Höhe	1035 mm	895 mm
Größte Breite	600 mm	600 mm
Größte Länge	650 mm	650 mm
Abstand zwischen den Handgriffen	470 mm	470 mm
Sitzbreite	455 mm	455 mm
Sitzhöhe	635 mm	540 mm
Wendekreis	840 mm	840 mm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	200 mm	200 mm
Breite Vorder-/Hinterrad	36 mm	36 mm
Handgriffe	Ergonomische – vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)	
Abstand Fahrbremse	70 mm	70 mm
Maß zusammengeklappt	l 650 × b 240 × h 815 mm	l 650 × b 240 × h 740 mm
Transportmaß (ohne Räder und Tasche)	l 600 × b 240 × h 760 mm	l 600 × b 240 × h 720 mm
Transportgewicht (ohne Räder und Tasche)	5,6 kg	5,4 kg
Gewicht mit Rädern und Tasche	7,8 kg	7,6 kg

Inspektion/Wartung/Wiedereinsatz

Es wird empfohlen, in regelmäßigen Abständen jedoch mindestens einmal pro Jahr eine Inspektion und Wartung des Rollators und der folgenden Teile am Rollator vorzunehmen. Die Häufigkeit ist davon abhängig, wie intensiv und wie stark der Rollator genutzt wird:

- Rohre, Rahmen und Schrauben
- Handgriffe und Handgriffrohre
- Bremsen und Bremsgriffe inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern
- Räder, Sitz und Zubehör

Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zum Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.

Reinigung

Ist Ihr TOPRO Troja 5G nach einem Ausflug verschmutzt, können Sie ihn mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln abspülen und -spritzen. Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuer- oder Schleifmittel sowie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.

Desinfektion

Eine professionelle Desinfektion, wie zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen notwendig, sollte nur von autorisiertem Fachpersonal und mit ausreichender Schutzausrüstung vorgenommen werden. Der TOPRO Troja 5G kann mit einem Desinfektionsmittel, das 70–80% Ethanol enthält, abgewischt werden. *Unschlagmäßige Handhabung und daraus resultierende Schäden und Verletzungen sind nicht vom Hersteller zu verantworten.*

Material/Wiederverwertung

Der Rollator besteht aus kunststoffbelegten Aluminiumrohren, Kunststoffverbindungen sowie aus Kunststoff und Polyester. Die meisten Teile können recycelt werden. Entsorgen Sie den Rollator und dessen Verpackung nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre zuständigen Behörden.

Zubehör / Neuheiten

Im engen Kontakt mit unseren zufriedenen TOPRO Kunden haben wir ein breites Zubehör-Sortiment entwickelt. Funktion, Design und Qualität passen 100 % zu Ihrem TOPRO Produkt und bieten Ihnen zusätzliche, sinnvolle Lösungen für Ihren Alltag. Eine Auswahl finden Sie auf den nächsten Seiten und natürlich bei Ihrem Fachhändler. Für die neueste Übersicht informieren Sie sich unter www.topromobility.com.

TOPRO übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzung seiner Produkte mit Zubehör, welches nicht explizit von TOPRO als solches freigegeben wurde.



Bitte besuchen Sie topromobilty.com, dort finden Sie eine vollständige Liste des verfügbaren Zubehörs für Ihren TOPRO Rollator.



Rollwiderstand-System (Paar)

Lässt sich stufenlos einstellen und so auf die Bedürfnisse des Nutzers anpassen.
Artikel-Nr. 814038



Abnehmbare Off-Road Räder

Perfekt für die Nutzung im unebenen Gelände wie Feldwege, Wald u.ä. Satz (vier Räder).
Artikel-Nr. 815302



Abnehmbare Spikereifen Perfekt für sicheren Halt auf Schnee und Eis. Satz mit zwei Hinterrädern (Bild zeigt altes Felgenmodell).
Artikel-Nr. 815331


Rückengurt mit Polster
in Höhe ergonomisch anpassbar
und in zwei Längen verfügbar

Artikel-Nr.
815270 (kurz, 67 cm)
815272 (lang, 75 cm)




Tablett
rastet sicher ein, ist leicht
abzunehmen und zu reinigen

Artikel-Nr. 814728

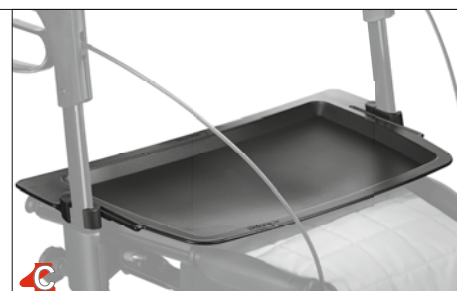

**Antirutsch-Matte
für Tablett**

Artikel-Nr. 814059

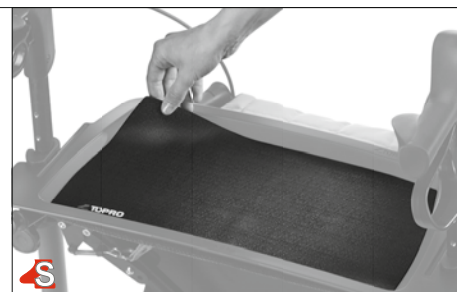

Stockhalter
links oder rechts montierbar

Artikel-Nr. 814040



Getränkehalter
damit der Durst jederzeit
gelöscht werden kann
(ohne Flasche)

Artikel-Nr. 814043



Rollatorschloss
auch andere hätten
Ihren TOPRO Troja 5G gerne

Artikel-Nr. LOCK





LED-Lampe mit Clip und USB-Stecker
gibt Sicherheit auch in der Dunkelheit

Artikel-Nr. 815260



Zusatz-Tasche
nah am Körper, ideal für Ihre Wertsachen wie Geldbeutel und Schlüssel

Artikel-Nr. 814046



Namensschild
um Verwechslungen Ihres TOPRO Troja 5G auszuschließen

Artikel-Nr. 814024




Einhand-Simultanbremse links oder rechts zur Einhandbedienung

Artikel-Nr. 814026



Begleitpersonengriff
z.B. für Sehbehinderte

Artikel-Nr. 814014

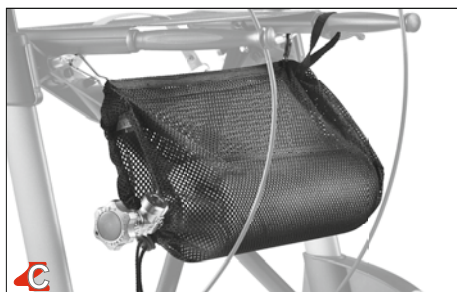

Netz für Sauerstoffflasche
für 2-Liter-Sauerstoffflaschen geeignet (nur gasförmig, nicht flüssig)

Artikel-Nr. 814009

Bitte besuchen Sie topromobility.com, dort finden Sie eine vollständige Liste des verfügbaren Zubehörs für Ihren TOPRO Rollator.



Schirm (schwarz)
inkl. Halterung
Artikel-Nr. 814068



Transporttasche
für die Reise in Flugzeug, Bus und Bahn
Artikel-Nr. 814042



Spikes für Schuhe
Größe M (ca. 36–40)
Größe L (ca. 41–46)
Artikel-Nr. 814029 (Größe M)
Artikel-Nr. 814035 (Größe L)